



tyromotion

TYMO[®]

Платформа для
оцінки та терапії

з функцією постурографії

TYROTHERAPY
GET BETTER.
EVERY DAY.

ТИМО СПРОЕКТОВАНО, РОЗРОБЛЕНО
ТА ВИГОТОВЛЕНО В АВСТРІЇ.

TYMO®

Мала та потужна система TYMO® (TIMO) є універсальним пристроєм для оцінки та терапії всього тіла.

На додачу до положення стоячи, TYMO® пропонує широкий вибір інших опцій для оцінки та тренування верхніх та нижніх кінцівок, а також тулуба. Він дозволяє аналізувати та тренувати силу, баланс на постуральний контроль. TYMO® має у комплекті м'яку подушку-накладку та дві балансувальні підкладки на магнітах для динамічного застосування.

Чому TYMO®?

- Може застосовуватися у будь-якому положенні в терапії: наприклад, стояння, сидіння, випади, планка ...застосуйте всю свою уяву!
- Короткий час налаштування
- Тонка та портативна
- Стандатизований баланс-тест та постурографія
- Відчуття стояння на твердій поверхні
- Зручна для дітей та дорослих



Одномірне та багатовимірне застосування

TYMO® терапія



Терапія для тулуба, верхніх та нижніх кінцівок



Тренування рівноваги та постурального контролю



Статичне та динамічне застосування



Тренування, орієнтоване на завдання та активність повсякденного життя



Терапевтичні ігри



Безпроводне підключення



ЛЕГКЕ
СЕРЕДНЄ



ВСЕ
ТІЛО



ХОДА ТА
БАЛАНС



СЕНСОР



АКТИВНИЙ



ПАСИВНИЙ




АСИСТИВНИЙ


Баланс-тест та постурографія з TYMO®

TYMO® пропонує стандартизоване оцінювання для аналізу балансу та визначення рівноваги та постурального регулювання у вертикальному положенні. Силкові датчики TYMO® фіксують перенесення ваги та визначають центр ваги (COP), відхилення тіла та розподілення навантаження на ступні. Ці дані визначають показники балансу, стабільності та симетрії.

Зворотній шлях

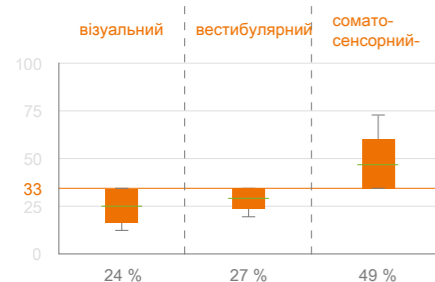

Площа центру ваги (COP)

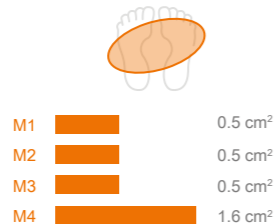

Оцінювання

- Трекінг центру ваги (COP)
- Область об'єму рухів
- Зміщення бокові та вперед-назад
- Середня швидкість

- Розподілення ваги
- Аналіз частоти (Індекс Ромберга)
- Візуальний, вестибулярний та соматосенсорний зворотній шлях



Рухові, сенсорні та когнітивні розлади можуть відновлюватися у ігровий спосіб



TYMO® терапія
різноманітна як саме життя

Варіанти терапії: Стояння, Сидіння, Випад, Сидіння-вставання, Сидіння з підтримкою, Сидіння з підпертими руками, Упор на ліктях, Рівновага-в одному та двох вимірах, Випад з упором на коліно, Баланс з відкритими очима, с закритими очима, Стояння на колінах, тощо

⊕ та багато іншого



3

Компоненти
ТайроТерапії:

ТАЙРОТЕРАПІЯ НИЖНІ КІНЦІВКИ

TyroS

Програма TyroS була створена у тісній співпраці з терапевтичними іграми. Це витончена терапевтична система, яка допомагає технології Tyromotion та випробувати та поєднує пристрої, ноу-хау та мотивувати пацієнтів.

- Одна програма для контролю за всіма пристроями Tyromotion
- Різносторонній огляд прогресу пацієнта на всіх пристроях
- Принципи моторного навчання та ціле-орієнтовного тренування
- Мотиваційне середовище з терапевтичними іграми
- Інтуїтивна та проста для розуміння програма




Інтенсивність



Дозування



Мотивація

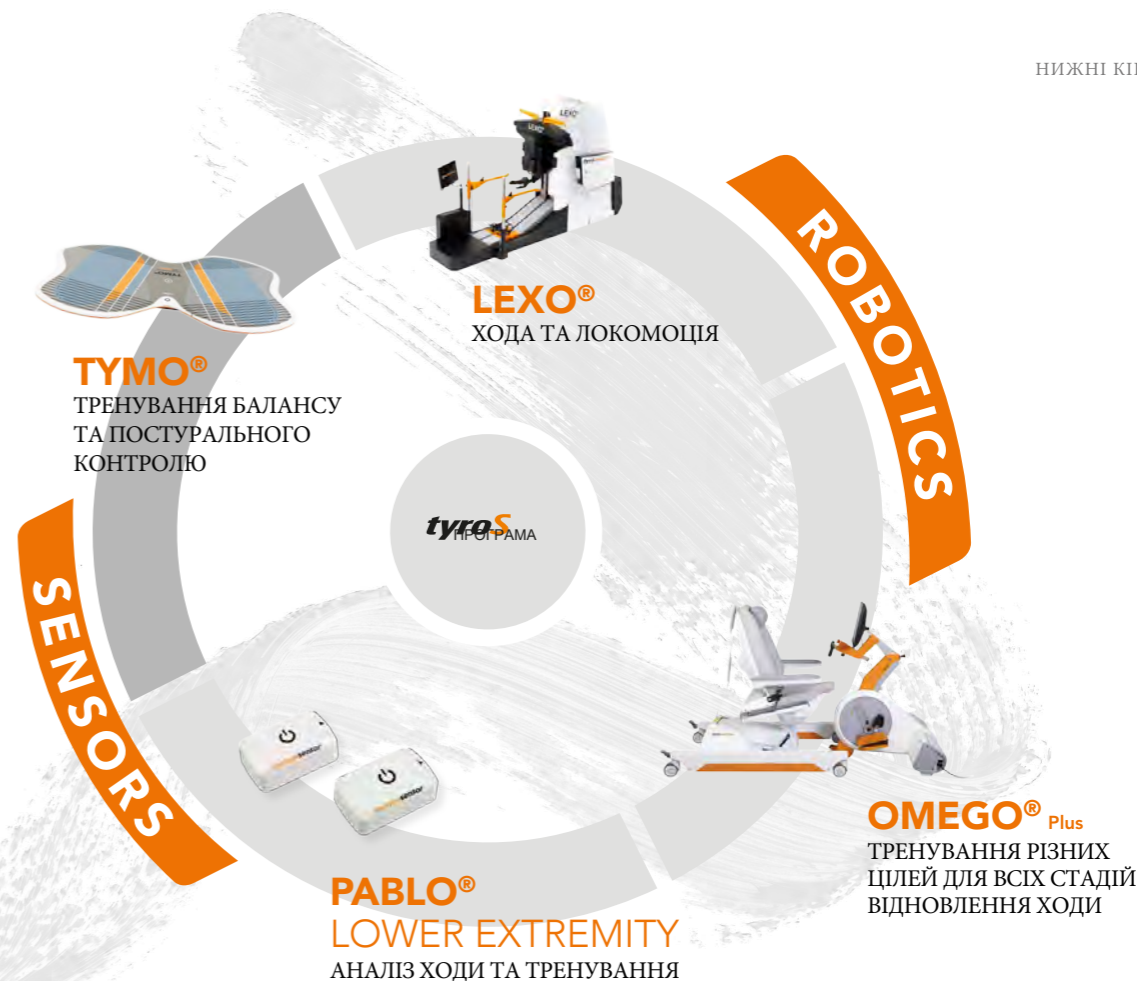

tyromotion



TYROMOTION



Tyromotion GmbH
Bahnhofgürtel 59
8020 Graz, AUSTRIA



+43 316 908 909
office@tyromotion.com

РЕХАФЛЕКС

ТОВ "РЕХАФЛЕКС"
Рибальська, 22, обр. 14.03
Київ 01011 УКРАЇНА

+380 44 504 22 77
info@rehaflex.com.ua

www.tyromotion.com

02/21

UA